

# LYCRAN

## Bond



### Haftvermittler für kreuzvernetzte Kunststoffzähne und Prothesenbasiskunststoffe

### Adhesion Primer for cross-linked acrylic teeth and denture base resins

NUR FÜR DEN DENTALEN GEBRAUCH DURCH  
FACHPERSONAL

ONLY FOR DENTAL USE BY QUALIFIED PERSONNEL



Feguramed GmbH  
Jahnstr. 2  
74722 Buchen (Odenw.) Germany  
Tel. +49 (0)6281/5227-0 FAX -15  
www.feguramed.com

CE 0482

MADE IN GERMANY

#### Gebrauchsinformation

#### Deutsch

##### Indikation:

Aufrauhmittel für kreuzvernetzte Kunststoffzähne und Kunststoffe.




##### Gegenanzeigen / Wechselwirkungen:

Hautkontakt mit der Flüssigkeit und Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden.

Nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht mehr verwenden.

##### Verarbeitung:

Die mechanisch angerauhten Zähne werden dünn mit **Lycran Bond** bestrichen. Dabei dürfen keine „Flüssigkeitspfützen“ zurück bleiben. Die so behandelten Zähne 2-3 min. ablüften lassen. Anschließend wird der Kunststoff appliziert.

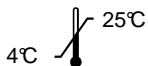

##### Lagerung:

Bei Raumtemperatur, ca. 22°C.  
Beachten Sie das Verfallsdatum.

##### Entsorgung:

Die Flüssigkeit muss im Sondermüll entsorgt werden.

##### Lieferform

REF

LY0160 Lycran Bond 50 ml

#### Instructions for use

#### English

##### Indication:

Etchant for cross-linked teeth and acrylics.



##### Problems of indication and contraindication:

Avoid skin contact with the liquid and inhalation of fumes.

Do not use after the expiry date.

##### Technique:

Apply a thin coat of **Lycran Bond** to the mechanically roughened teeth. Ensure that there are no pools of liquid. Allow the prepared teeth to dry in air for 2 -3 min. Then apply acrylic resin.



##### Storage:

At room temperature, approx. 22°C.  
Please observe the shelf-life.

##### Disposal:

The liquid should be disposed of as hazardous waste.

##### Presentation:

REF

LY0160 Lycran Bond 50 ml